

INSTRUCCIONES GENERALES.




Paso # 1 Complete la información requerida en el formulario “Solicitud de Análisis” y firmar el “Consentimiento informado” previa lectura.

Paso#2 Prevea una zona limpia para dejar secar los cepillos luego del raspaje de las mejillas.

NOTA: Espere por los menos una hora después de comer o beber antes de llevar a cabo el procedimiento.

Paso#3 Obtención de las células de la mejilla:

- Lávese bien las manos.
- Extraiga uno de los cepillos del envoltorio, tome el cepillo siempre por el mango y nunca toque el extremo donde se va tomar la muestra. Introduzca la parte de las cerdas del cepillo en el interior de la boca. Raspe la pared interior de la mejilla haciendo presión sobre la misma durante al menos 30 segundos, de abajo hacia arriba y/o rotando el cepillo de forma que se deposite la muestra en toda la zona de contacto.

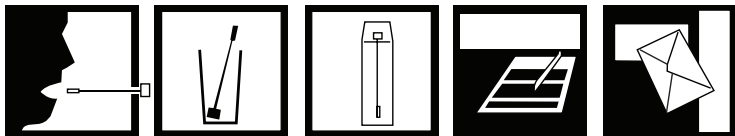

- Repita el mismo procedimiento para los 4 cepillos restantes.
- Dejar secar los 5 cepillos al aire durante 15 minutos en un lugar previamente higienizado con cuidado de que el extremo con el que se tomó la muestra no esté en contacto con la mesa.

Paso#4 Introduzca el cepillo dentro del sobre (sobre “TOMA DE MUESTRA”)

Paso#5 Coloque la solicitud de análisis completa, el consentimiento informado, en conjunto con la el sobre de toma de muestra dentro del estuche de cartón.

Cualquier duda comunicarse al:

Argentina: Tel.: (5411) 4822 6333

Uruguay: Tel.: (598) 2712 1212

o el mail genia@laboratoriogenia.com